



Aesthetic-Press™:

CE 0535

Classic

Bleach

High Chroma Bleach

A, B, C, D, Gingiva

Brenntabelle

Press-Programm						
B	↑^	T	N*	H	V1	V2
700	60	930°C	2	20	700	930
Opaquer						
B	↑^	T	S	H	V1	V2
450	55	950°C	6	1	550	950
Korrektur-Brand/Schichtpulver LF						
B	↑^	T	S	H	V1	V2
450	55	780°C	6	1	550	780
Korrektur-Brand/Schichtpulver HF						
B	↑^	T	S	H	V1	V2
450	55	905°C	6	1	550	905
Glanz-Brand ohne Glasurmasse-bei Kronen u. Brücken ohne Keramikschulter!						
B	↑^	T	S	H	V1	V2
450	55	880°C	6	1	0	0
Glanz Brand mit Glasurmasse insbesondere bei Veneers und Keramik Inlays						
B	↑^	T	S	H	V1	V2
450	55	760°C	6	1	550	760

**Die Brenntemperatur sind lediglich Richtwerte. Diese muessen von Ofen zu Ofen angeglichen werden.*

** N= Nachpresszeit bei EP 500*

Aesthetic Press

Binterimstr. 12

40223 Düsseldorf

Tel. + 49 (0) 211-2482294

Fax. +49 (0) 211-2989131