



Aesthetic-Press™:

CE 0535

Zircon

Zircon Bleach

Zircon High Chroma Bleach

Zircon A, Zircon B, Zircon C, Zircon D, Zircon Gingiva

Brenntabelle**

Presstemperatur						
Bereitschaft	Anstiegsrate	Endtemp.	N*	Haltezeit	Vac Ein	Vac Aus
700	60	840°C	2	20	700°C	840°C

Korrekturmasse/Schichtpulver

Brenntemperatur							
Bereitschaft	Anstiegsrate	Endtemp.	Schliesszeit	Haltezeit	Vac Ein	Vac Aus	Langzeit Abk.
400	45	790°C	6	1	550°C	790°C	700°C

Glanzbrand

Brenntemperatur							
Bereitschaft	Anstiegsrate	Endtemp.	Schliesszeit	Haltezeit	Vac Ein	Vac Aus	Langzeit Abk.
400	45	795°C	4	1	0	0	700°C

* Bei EP 500

**Brenntemperatur kann bei verschiedenen Oefen unterschiedlich sein.

Es empfiehlt sich eine langsame Steig- und Abkühlphase!

Aesthetic-Press GmbH
Binterimstr. 12
40223 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211-2482294
Fax.+49 (0) 211 204-913